

# ウルトラシールXTプラスJ

小窩裂溝封鎖材



保険適用  
特定保険医療材料  
歯科充填用材料I

- ・高い接着力による高い維持率<sup>2</sup>
- ・深い小窩裂溝の奥までデリバリーが可能
- ・4色のシェード
- ・プライマドライJ(乾燥材)によるシーラント治療
- ・フィラー58%による重合収縮抑制、耐摩耗性


ウルトラシールXTプラスJは光重合型のシーラント材です。付属のインスパイラルブラシチップを使用することでチキソトロピー(ずり減粘性)が発生し、低粘度に変化することによって小窩裂溝の奥まで封鎖することが可能です。



## ウルトラシールXTプラスJ使用前と使用後



使用前

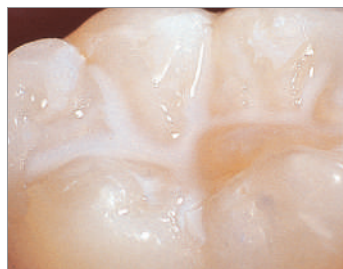

使用後



使用前の小窩裂溝



ウルトラシールXTプラスJにより小窩裂溝を塞ぐことでう蝕の予防が可能

## 725-JP ウルトラシール XTプラスJ オペークホワイトキット

ウルトラシールXTプラスJ(1.2mL)	1本
ウルトラエッチJ(1.2mL)	1本
プライマドライJ(1.2mL)	2本
ブルーマイクロチップ	20個
インスパイラルブラシチップ	20個



## 716-JP プライマドライJリフィル

プライマドライJ(1.2mL)	4本
-----------------	----



## ウルトラシール XTプラスJ リフィル

ウルトラシールXTプラスJ(1.2mL)	4本
----------------------	----

726	オペークホワイトリフィル
565	クリアリフィル
1289	A1シェードリフィル
734	A2シェードリフィル



販売名: ウルトラシール XT プラス J / 一般的名称: 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材 / 管理医療機器 / 医療機器認証番号: 223AKBZX00027000 / 冷蔵保存 / 特定保険医療材料: 歯科充填用材料 I

## インスパイラルブラシチップ

710-JP	20個
--------	-----



販売名: インスパイラルブラシチップ / 一般的名称: 歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X10086000014

## ブルーマイクロチップ

158-JP	20個
127-JP	100個



販売名: ブルーマイクロチップ / 一般的名称: 歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X10086000009

## 使用方法



15秒



### 2. 洗浄・乾燥

1. エッチング  
ウルトラエッチJを塗布し15秒間放置します。



5秒


### 3. プライミング

プライマドライJを塗布し5秒間放置し軽くエアブローします。



### 4. 充填

ウルトラシールXTプラスJをすり込みます。

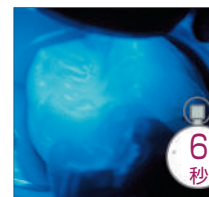

6秒

### 5. 光重合

VALOのプラズマモードであれば3秒硬化2回で光重合が完了します。

1. <http://www.realityesthetics.com>

2. Boksman L, Carson B. Two year retention and caries rates of UltraSeal XT and FluoroShield light-cured pit and fissure sealants. Gen Dent 1998 March- April;46(2):184-187

# opalpix™

オパールピックス  
歯間クリーナー



爪楊枝とオパールピックスの形状比較



やわらかい、しなやかな  
この曲がり具合、“折れない”

- 柔軟性と丈夫さの絶妙なバランス
- ゼラゼラした表面により汚れを落としやすい
- 折れにくい、破損しづらい性質
- 歯周病、矯正中の患者さんに
- 隣接面、歯間乳頭をやさしく歯肉マッサージ
- フロスが届きにくい部位に
- ブラーク除去にも



ゼラゼラした表面が汚れを掻きとってくれます。



接着されたリテーナーや矯正用ブラケット周り、  
及び歯間部の清掃に。

6600 オパールピックス  
12PK入り(1PK 32本入り)



院内掲示用ポップがあります。詳細はP65をご覧ください。

トレイをそのまま装着!

# UltraEZ®



知覚過敏の抑制ってこんなに簡単!



ウルトライーズの詳細はP.14をご覧ください。