

ウルトラエッチ J

エッチング材



保険適用

手技料包括



※保険点数算出方法は、各歯科医師会にご確認ください。

- 脱灰深度をコントロールするエッチング材
- インスパイラルブラシチップやブルーマイクロチップで細部まで塗布可能（小窩裂溝底部までも）
- 洗浄が簡単なシリカ粒子配合

ウルトラエッチ J は 35% のリン酸ジェルです。インスパイラルブラシチップ、ブルーマイクロチップを使用することで適度なフローによるエッチング処置が行えます。


ウルトラエッチ J の粘度は、塗布した位置からの流出が少なく、不要な箇所の脱灰が起こらない粘度です。

適度なフローは最も狭い小窩裂溝底部まで染み入り、確実なエッチングが可能です。ジェル状の形態を維持し、十分な厚みをどの部位でも保つことができるので、脱灰中に乾燥してしまうこともありません。

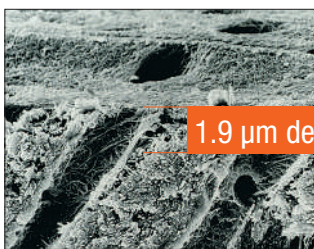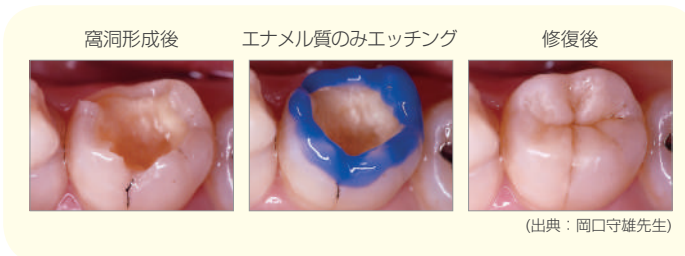

リン酸エッチング材であるウルトラエッチは脱灰深度をセルフコントロールできるエッチング材です。15秒間で1.9μmの脱灰深度があるとされています。² 報告されている液状タイプの37%リン酸エッチング材(他メーカー)は、通常20秒間で平均5.0μmの脱灰深度があるとされており、オーバーエッチングになりがちです。³ 必要以上のエッチング材による脱灰を防ぐためにも、脱灰深度をセルフコントロールできることはとてもユニークな点といえるでしょう。

1. <http://www.realityesthetics.com> 2. Perdigão J, Lambrechts P, Van Meerbeek B, Vanherle G. A FE-SEM study of the ultramorphology of etched dentin [IADR abstract 2982]. J Dent Res. 1996;75(suppl):390. 3. Perdigão J, Lambrechts P, Van Meerbeek B, Vanherle G. A field emission SEM study of dentin etched with different phosphoric acid compositions and/or concentrations. Katholieke Universiteit Leuven; Leuven, Belgium; 1994.

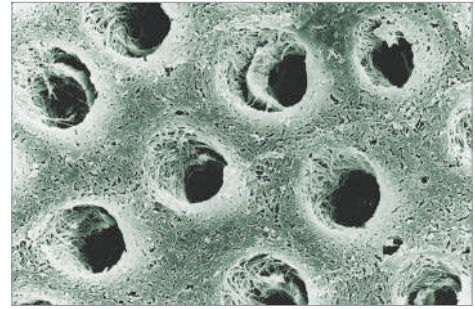

ウルトラエッチJによるエッチング後のSEM写真。象牙細管を認める。

163-JP ウルトラエッチJ キット

ウルトラエッチJ(1.2mL) 4本
ブルーマイクロチップ 20個



お徳用

997-JP ウルトラエッチJ 2本キット

ウルトラエッチJ(1.2mL) 2本
ブルーマイクロチップ 10個



初めて
ご使用の方へ

ウルトラエッチJ リフィル

164-JP ウルトラエッチJ(1.2mL) 4本
1407-JP ウルトラエッチJ(1.2mL) 50本



販売名：ウルトラエッチ J / 一般的名称：歯科用エッチング材 / 管理医療機器 / 医療機器認証番号：21800BZG10019000 / 室温保存（避光）


◆ 広範囲に筆塗り感覚で…

インスパイラルブラシチップ

710-JP 20個



販売名：インスパイラルブラシチップ / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000014

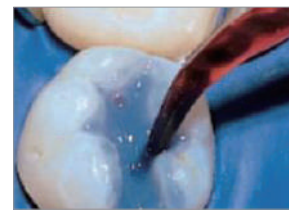

◆ 通常のご使用に…

ブルーマイクロチップ(25G)

158-JP 20個
127-JP 100個



販売名：ブルーマイクロチップ / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000009



ウルトラブレンドプラス J

間接覆罩・裏層材




保険適用

手技料包括
歯髄保護処置など


※保険点数算出方法は、各歯科医師会にご確認ください。

- 裏層材としてコンポジットレジンやアマルガム修復前に使用
- シリンジ塗布型でコントロールしやすいため感染を予防
- 非水溶性
- 光重合型
- 生体親和性の高いレジンと水酸化カルシウムをブレンド
- X線不透過
- 接着強度3~5MPa

ウルトラブレンドプラスJはブラックマイクロチップと併用するとフローが最適になります。処置部が大きいときにはブラックミニチップをご使用ください。

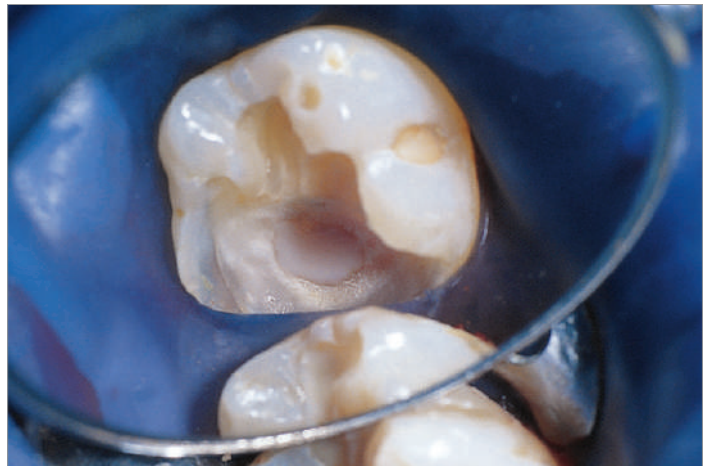

ウルトラブレンドプラスJを用いた白歯部における覆罩の写真

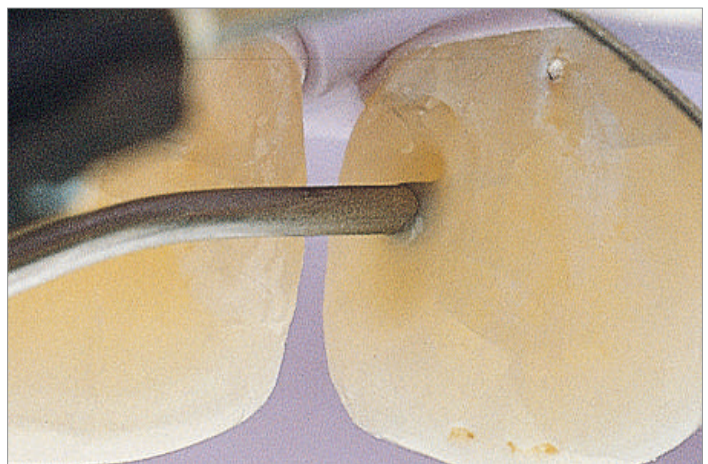

患部を消毒およびエアードライ後、患部へ塗布

1025-JP ウルトラブレンドプラスJ キット デンチン

ウルトラブレンドプラスJ デンチン(1.2mL) 4本
ブラックマイクロチップ 20個
ブラックミニチップ 20個



416-JP ウルトラブレンドプラスJ リフィル デンチン

ウルトラブレンドプラスJ デンチン(1.2mL) 4本



販売名：ウルトラブレンドプラスJキット デンチン／一般的名称：歯科裏層用高分子系材料／
管理医療機器／医療機器認証番号：21800BZG10003000／冷蔵保存

ブラックミニチップ(太)

196-JP 20個



販売名：ブラックミニチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000010

ブラックマイクロチップ(細)

194-JP 20個
1085-JP 100個



販売名：ブラックマイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000008