

ジフィー ポリッシャー



new



- オートクレーブ滅菌可能（※ ブラシ製品は再使用禁止）
- 研磨性に優れたシリコンラバー
- 3つの粗さ
- ラテックスフリー
- コンポジット研磨専用

#4254 ジフィーコンポジット アジャスティング アンド ポリッシングキット

ジフィーカップ3個入り(粗め1個、ミディアム1個、ファイン1個)
 ジフィーディスク3個入り(粗め1個、ミディアム1個、ファイン1個)
 ジフィーポイント3個入り(粗め1個、ミディアム1個、ファイン1個)
 ジフィーコンポジットポリッシングブラシ2個入り(レギュラー1個、ポイント1個)



#848-JP ジフィーポリッシャー バラエティパック

ジフィーカップ5個入り
 (粗め2個、ミディアム2個、ファイン1個)
 ジフィーディスク5個入り
 (粗め2個、ミディアム2個、ファイン1個)
 ジフィーポイント10個入り
 (粗め4個、ミディアム4個、ファイン2個)



ジフィーカップ使用例

(出典：ネブラスカ大学メディカルセンター歯学部成人修復科 渡邊英彦先生)



1 粗め(緑)で研磨
 2 ミディアム(黄)で表面をなめらかにしていく
 3 ファイン(白)で更に表面をなめらかに
 4 ハイシャイン(青)で最終研 仕上げり
 5 磨を行う

- #890-JP ジフィー 粗め カップ 20個
- #892-JP ジフィー 粗め ポイント 20個
- #891-JP ジフィー 粗め ディスク 20個
- #838-JP ジフィー ミディアム カップ 20個
- #839-JP ジフィー ミディアム ポイント 20個
- #840-JP ジフィー ミディアム ディスク 20個
- #841-JP ジフィー ファイン カップ 20個
- #842-JP ジフィー ファイン ポイント 20個
- #843-JP ジフィー ファイン ディスク 20個



販売名：Jiffy 研磨システム / 一般的名称：歯科用口腔内清掃キット / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000063

製品比較表

製品画像	形状	色	粒子	砥粒	粒子サイズ	素材	回転数	包装
	カップ	緑	粗め	炭化ケイ素	63 ミクロン	シリコンゴム	10,000rpm 以下	20 個入り
	ディスク							
	ポイント							
	カップ	黄	ミディアム	酸化アルミニウム	45 ミクロン	シリコンゴム	10,000rpm 以下	20 個入り
	ディスク							
	ポイント							
	カップ	白	ファイン	酸化アルミニウム	4 ミクロン	シリコンゴム	10,000rpm 以下	20 個入り
	ディスク							
	ポイント							
	カップ	青	ハイシャイン	ダイヤモンド	10 ミクロン	シリコンゴム	10,000rpm 以下	20 個入り
	ディスク							
	ポイント							
	レギュラーブラシ	—	—	—	—	アラミド繊維	3,000rpm 以下	10 個入り
	ポイントブラシ							
	ゴートヘアブラシ							
						山羊毛		

1 http://www.realityesthetics.com

ジフィー ハイシャイン

マイクロハイブリッドコンポジットレジン専用



- ダイヤモンドパウダー入りシリコンラバー
- 様々な症例に対応可能
- ラテックスフリー

- #3061-JP ジフィー ハイシャイン カップ 10個
- #3060-JP ジフィー ハイシャイン ポイント 10個
- #3062-JP ジフィー ハイシャイン ディスク 10個

ジフィー コンポジット ポリッシングブラシ



レギュラー・ポイント




咬合面の研磨に適した硬さのブラシ



レギュラー ポイント

- 1000以上の研磨用炭化ケイ素粒子を含むため、研磨後はきめ細かい仕上がりを得ることが可能
- コンポジットレジン、セラミックの臼歯部咬合面へアクセスしやすい形状
- コンポジットレジンの研磨には低速回転で、高いRPM数値の研磨が可能

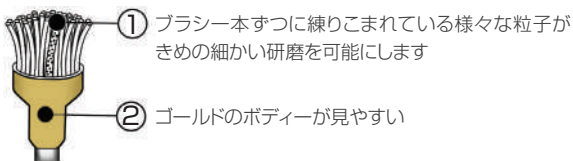

- #850-JP ジフィー コンポジットポリッシングブラシ レギュラー 10個
- #1009-JP ジフィー コンポジットポリッシングブラシ ポイント 10個

ジフィー ゴートヘアブラシ



- 山羊の毛を使用
- ダイヤモンドポリッシュメントとの併用で光沢のある仕上がりに
- 少量の圧をかけながら、低速回転での研磨

#1029-JP ジフィー ゴートヘアブラシ 10個



ダイヤモンドポリッシュメント



ブラックミニチップ

- 高品質のダイヤモンド微晶質粒子を含むコンポジットレジン研磨材
- 審美的な研磨に最適
- ポーセレン、コンポジットレジンの研磨に対応
- ミントフレーバーのため、口腔内でさわやかな香り

- #5540-JP ダイヤモンドポリッシュメント 0.5 μ m ミニリフィル 1.2mL シリンジ 2本入り
- #5541-JP ダイヤモンドポリッシュメント 1.0 μ m ミニリフィル 1.2mL シリンジ 2本入り



ブラックミニチップ

#196-JP 20個



販売名：ブラックミニチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000010